

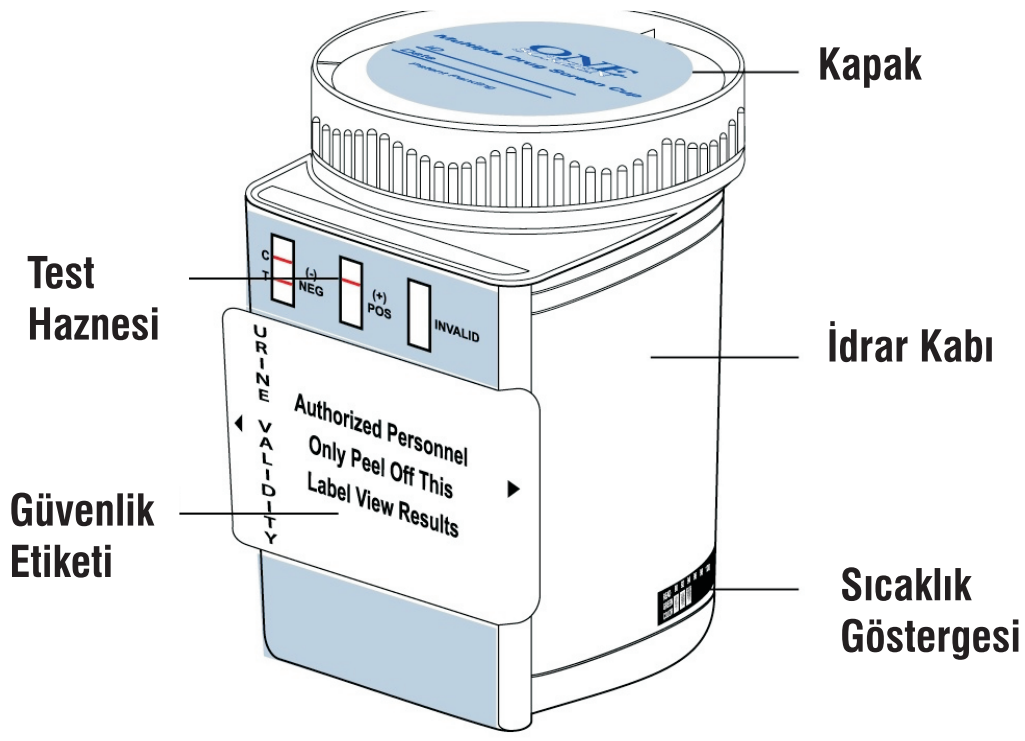


OneScreen Uyuşturucu Test Bardağı Kullanma Kılavuzu

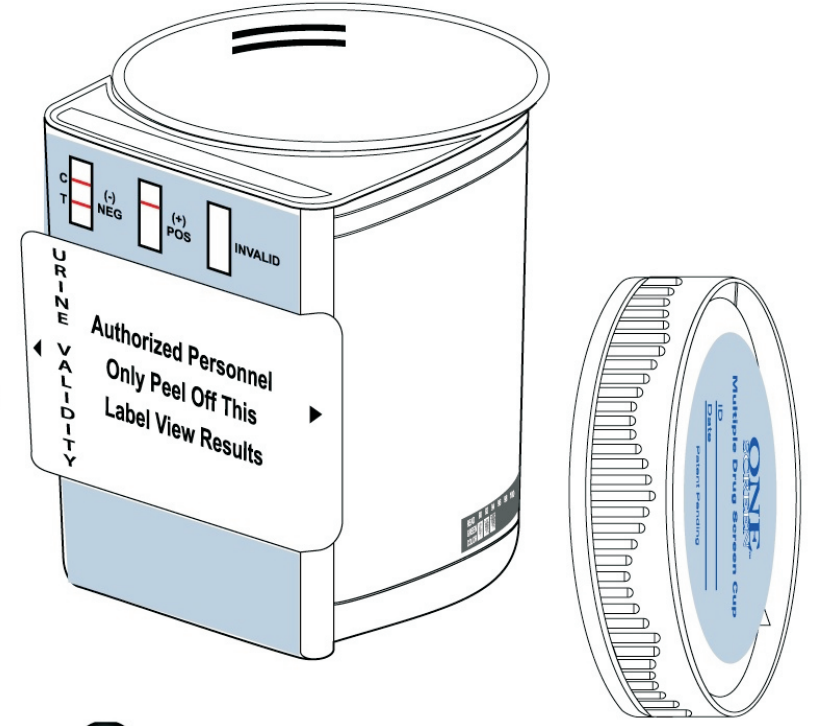


1. Kapağı Açın

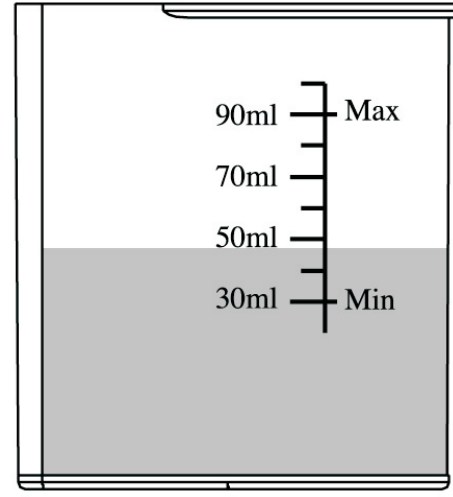


2. Taze İdrarı (Min ve Max) Bölgeler Arasında İdrar Kabına Koyun ve Kapağı Kapatın


3. 2-4 Dakika İçerisinde İdrarın Sıcaklığını Kontrol Edin ve Yeşil Rengi Görün

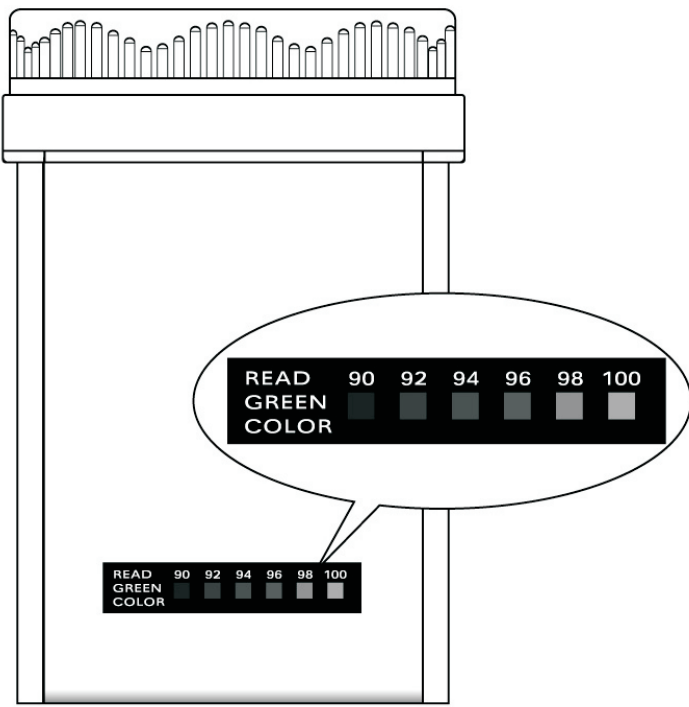


4. Bardağı Düz Bir Zemine Bırakın İdrarı Bardağa Koyduktan Sonra 5 Dakika Bekleyin

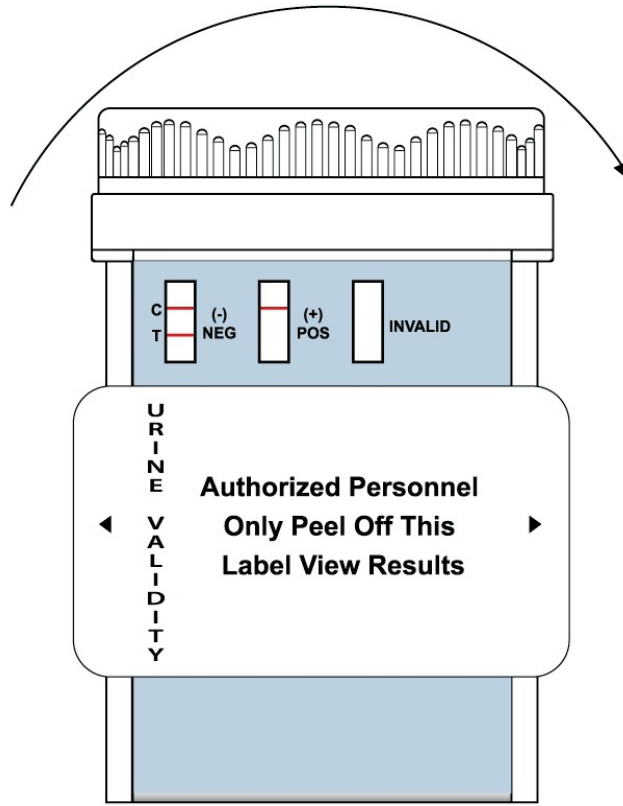


5. 5 Dakika Sonra Etiketi Çıkarın

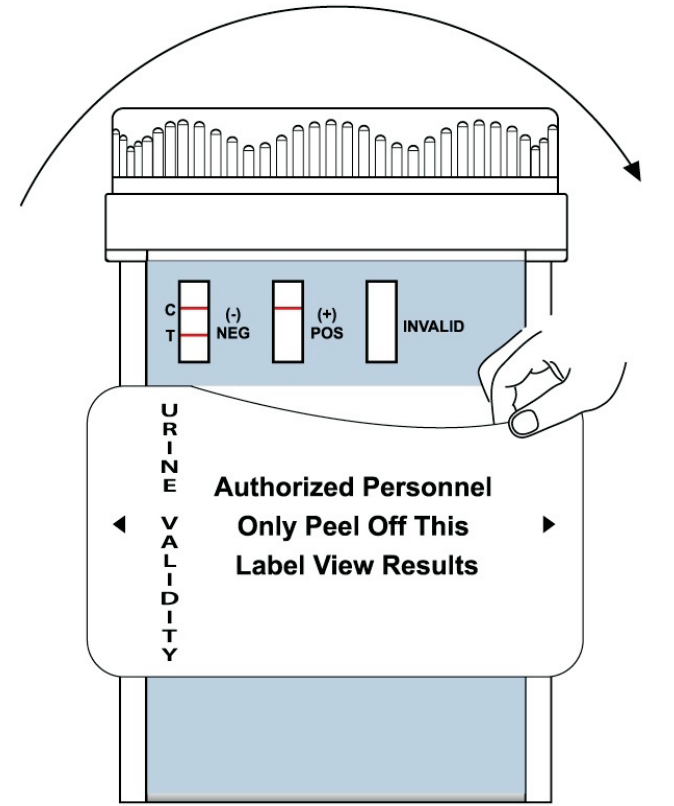


6. Şimdi Sonuçları Okuyabilirsiniz. C Hattında Muhakkak Çizgi Çıkması Gerekmetedir. Eğer C Hattında Çizgi Çıkmasa Testler Geçersiz Olur. Daha Sonra Uyuşturucu Maddelerin Çizgileri Kontrol Edilir. Eğer İlgili Bölümde Çizgi Varsa O Test Negatiftir. Eğer Çizgi Yoksa O Test Pozitiftir. Aşağıdaki Örnekleri İnceleyebilirsiniz.

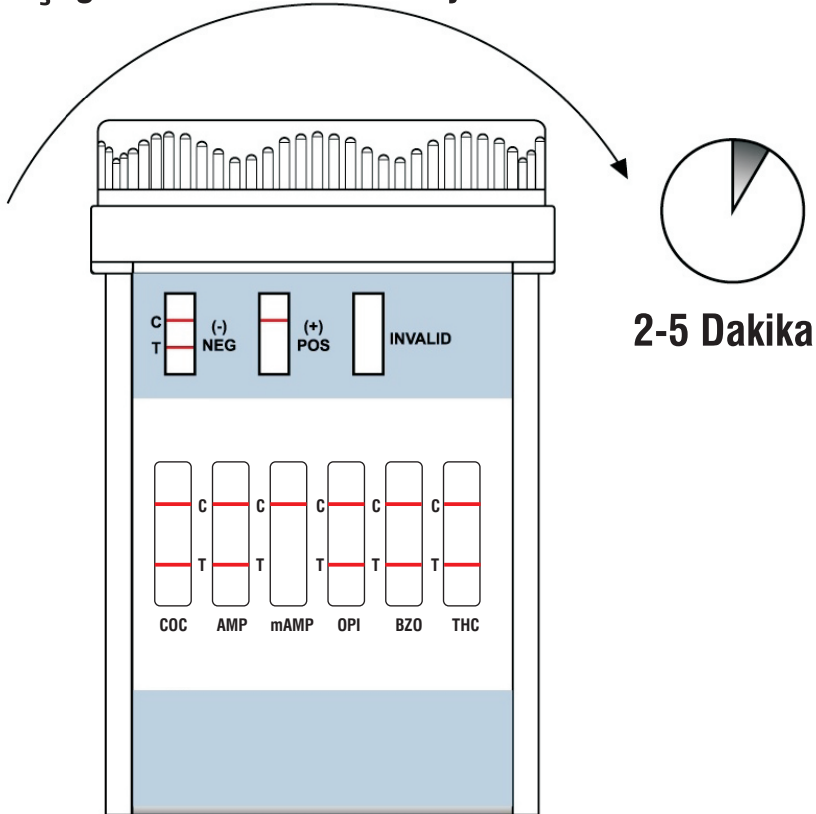

Sadece mAMP Testi Pozitiftir

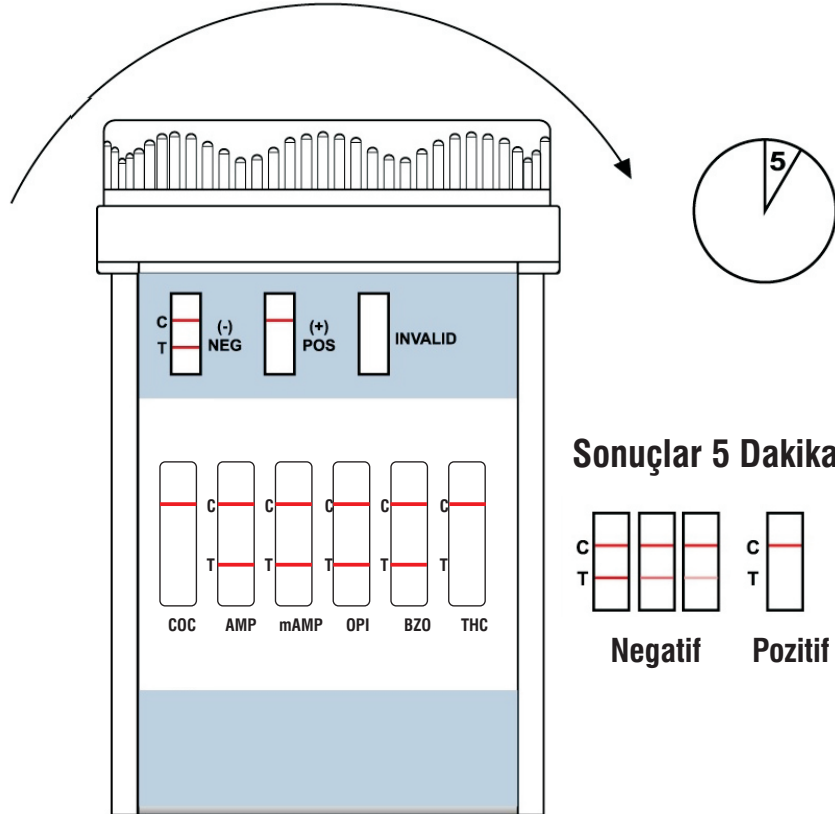


Sadece COC ve THC Testi Pozitiftir

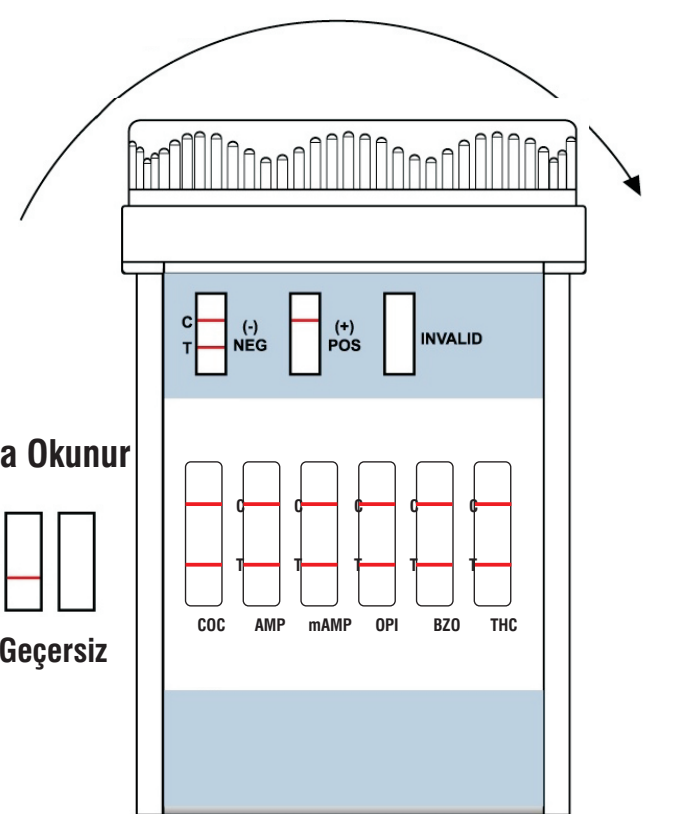

Tüm Testler Negatiftir

Sonuçlar 5 Dakikada Okunur

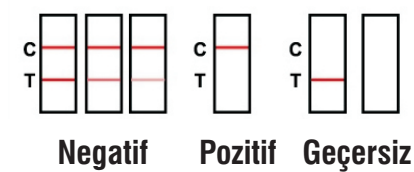

Negatif Pozitif Geçersiz